




Materiais fornecidos:

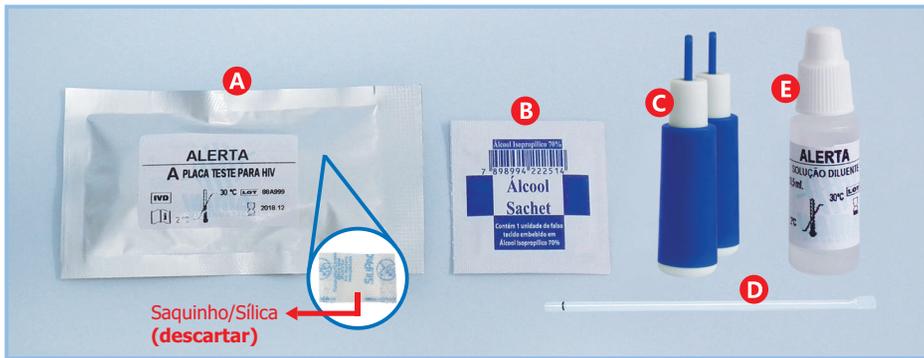

- A Placa-teste**
- B Álcool sachê**
- C 2 Lancetas**
- D Pipeta**
- E Solução diluente**

Saco plástico transparente


Procedimentos para o teste:

IMPORTANTE: Ler as instruções de uso com atenção. Tenha um relógio ou cronômetro em mãos (item não fornecido). Recomenda-se assistir ao vídeo explicativo dos procedimentos no site www.testealerta.com.br


Passo 1: Abrir a embalagem, retirar a **Placa-teste A** e colocá-la sobre uma superfície plana e seca.



Passo 2: Limpar a ponta do dedo que será furado utilizando a gaze do **Álcool sachê B**.

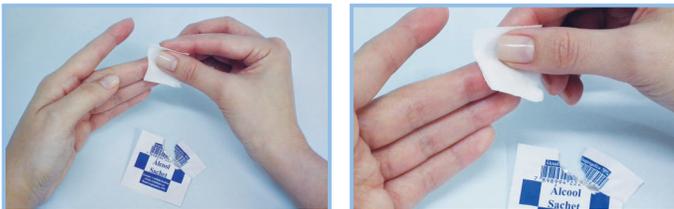

Passo 3: Girar o pino para destravar a **Lanceta C** e retirá-lo.

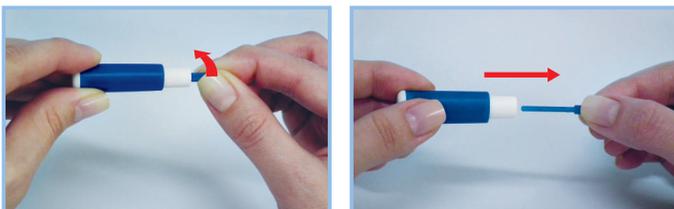

Passo 4: Pressionar fortemente a ponta da **Lanceta C** na lateral do dedo para furá-lo. Em seguida, **apertar o dedo até formar uma gota de sangue grande**.




OBS: Após destravar, a lanceta funcionará apenas uma vez. Por isso, caso não consiga perfurar o dedo corretamente da primeira vez, repetir o procedimento com a lanceta extra fornecida com o kit.


Passo 5: Pressionar a parte traseira da **Pipeta D** e encostar a outra ponta na gota de sangue. Cuidadosamente aliviar a pressão para que o sangue preencha até a marca. **OBS:** Evitar a formação de bolhas de ar nesse processo.




Passo 6: Encostar a ponta da **Pipeta D** dentro da cavidade redonda da **Placa-teste A** e pressionar a parte traseira da **Pipeta D** para depositar todo o sangue.

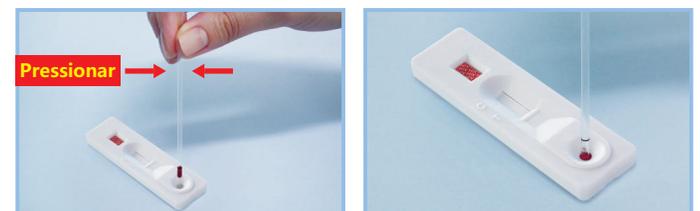

Passo 7: Pingar **3 (três)** gotas da **Solução diluente E**, com o frasco plástico na posição vertical e marcar o tempo.

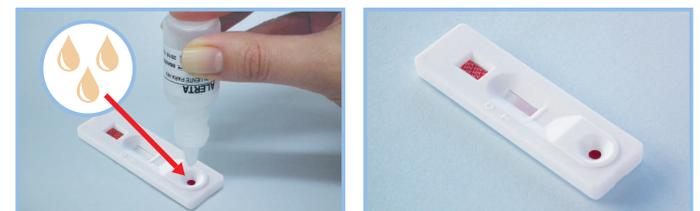

Passo 8: Fazer a leitura do resultado em exatamente 15 minutos.

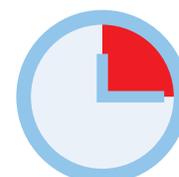

15 minutos

Não ler o resultado do teste antes ou após o tempo indicado.



Interpretação do resultado:

Positivo



Provável HIV Positivo

O resultado será POSITIVO quando aparecerem duas linhas, uma ao lado da letra «T» e outra ao lado da letra «C».

- Um resultado positivo deve ser confirmado por outros exames laboratoriais. Para isso, entre em contato com um médico.
- Aguardando confirmação de seu resultado, sempre use camisinha para proteger a si mesmo e aos outros.

Coloque seu teste aqui

Negativo



Provável HIV Negativo

O resultado será NEGATIVO quando aparecer apenas uma linha ao lado da letra «C».

- Um resultado negativo pode aparecer em uma pessoa que foi infectada dentro dos últimos 30 dias.
- Você não pode concluir ser HIV negativo se foi exposto a uma situação de risco até 30 dias antes da realização do teste.

Inválido



Teste Inválido

O resultado será INVÁLIDO, quando:
Não aparecer uma linha ao lado da letra «C»
ou quando não aparecer nenhuma linha.

Neste caso, desconsiderar e descartar o teste.
Entrar em contato com o SAC da Wama Diagnóstica.

Guia de intensidade de cor



Obs: Qualquer intensidade de cor da linha ao lado da letra «T» deve ser considerada como positivo.

Armazenamento:

Conservar em local seco e fresco (temperatura entre 2°C e 30°C).
Não congelar.

Descarte:



Lixo Comum



Wama Produtos para Laboratório Ltda.
CNPJ: 66.000.787/0001-08.
Rua Aldo Germano Klein, 100. CEAT.
CEP 13573-470. São Carlos/SP, Brasil.
sac@wamadiagnostica.com.br
www.testealerta.com.br

Resp.Téc.: Leise Daiana Martins. CRBM - SP: 21.949
Registro ANVISA - MS nº: 10310030194

1 Edição: Rev. 08/2018



SAC: 0800 772 9977 e 16 98224.9977

PLANTÃO 24 HORAS

Ministério da Saúde - Disque Saúde: 136